



COVID-19 Antigen Test

Mono-Test rapido per la ricerca dell'antigene SARS-CoV-2 - Nasale/Nasofaringeo



4BShopLab



Rivolto a pazienti con sospetta infezione
in corso da COVID-19



Prodotto Italiano



Risultati in tempi rapidi,
risposta in soli 15 minuti



Elevata Affidabilità Nasale:

Concordanza con il test molecolare $\geq 95\%$

Elevata Affidabilità Nasofaringeo:

Concordanza con il test molecolare $\geq 98\%$



Mono-Test confezionato in busta di alluminio
completa di reagenti singoli



Test di facile esecuzione ed interpretazione
utilizzabile in qualsiasi contesto



Test ideale per analisi su larga scala




Costi contenuti rispetto al metodo
di riferimento RT-PCR




Supporto da parte di un nostro biologo

ESECUZIONE DEL TEST NASALE


Prelevare il campione usando il tampone incluso nel kit come da procedura standard

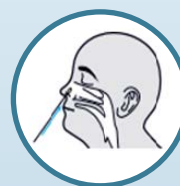

Forare la membrana sigillante della provetta contenente il reagente di estrazione con la punta del tappo gocciolatore

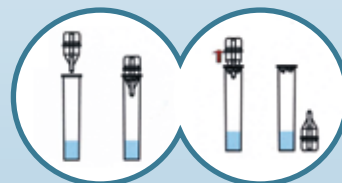


Estrarre il campione agitando e schiacciando il tampone nella provetta di estrazione, assicurarsi che tutto il liquido sia stato rimosso dal tampone

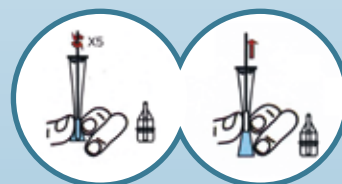


Miscelare il contenuto della provetta, lasciare riposare per 1 minuto



Scartare le prime 2 gocce e depositare 3 gocce nel pozzetto SAMPLE, attendere 15 minuti

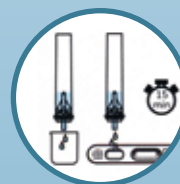

Leggere il risultato

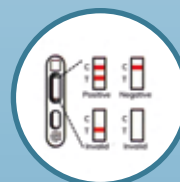


ESECUZIONE DEL TEST NASOFARINGEO


Prelevare il campione usando il tampone incluso nel kit come da procedura standard



Forare la membrana sigillante della provetta contenente il reagente di estrazione con la punta del tappo gocciolatore

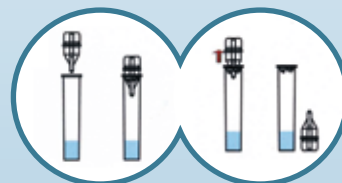


Estrarre il campione agitando e schiacciando il tampone nella provetta di estrazione, assicurarsi che tutto il liquido sia stato rimosso dal tampone

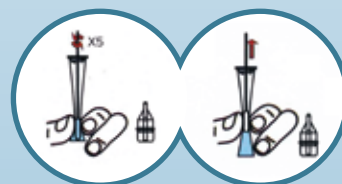


Miscelare il contenuto della provetta, lasciare riposare per 1 minuto



Scartare le prime 2 gocce e depositare 3 gocce nel pozzetto SAMPLE, attendere 15 minuti

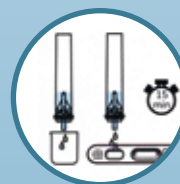

Leggere il risultato

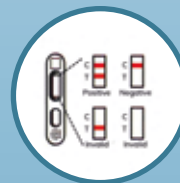

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di campione: tampone nasale/nasofaringeo

Durata del test: 15 minuti

Conservazione: 2°C - 30°C

Contenuto kit:

- 25 Mono-Test rapido SARS-Cov-2 Antigen confezionate in buste di alluminio
- 1 istruzioni per l'uso.

Contenuto singola busta:

- 1 dispositivo di test
- 1 tampone nasofaringeo
- 1 provetta di estrazione con reagente di estrazione
- 1 gocciolatore
- 1 guida d'uso rapida



INFORMAZIONI D'USO

Test rapido immunocromatografico per la determinazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 (Ag) in tampone nasofaringeo su individui sospetti di COVID-19 in fase acuta o con sintomi tipici della malattia.

Il test rapido SARS-Cov-2 Antigen é per uso esclusivamente diagnostico "in vitro". Il test cromatografico rapido antigenico, sebbene con una sensibilità inferiore al molecolare, rappresenta quindi un mezzo efficace, di semplice esecuzione manuale e rapido per il monitoraggio di massa dell'infezione.

Il test può essere utilizzato in qualsiasi




contesto di laboratorio e non di laboratorio che soddisfi i requisiti specificati nelle Istruzioni per l'uso e nelle normative locali.

I risultati del test di questo prodotto sono solo di ausilio diagnostico e non possono essere utilizzati come unica base per confermare o escludere la diagnosi. Per raggiungere scopi diagnostici, i risultati devono essere sempre valutati in combinazione con l'esame clinico, la storia medica e altri dati di laboratorio.

The logo for 4BShopLab features the text "4BShopLab" in a blue, sans-serif font. The letter "o" in "Shop" is replaced by a stylized blue and white icon of a laboratory flask.

CONTATTI DISTRIBUTORE

4BShop Lab Srls

-  info@4BshopLab.com
-  www.4BShopLab.com
-  +39.0371.18.56.643

FABBRICANTE

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes Srl

 **MADE IN ITALY**

EN ISO 13485:2013 Certified

